


TESTUTFÖRANDE av Analyz hCG 2000

Testplattan och urinprovet bör ha antagit rumstemperatur innan testning. Öppna ej påsen förrän testet är klart att utföras.


- 1** Ta ut testplattan ur sitt skyddshölje (se till att plattan håller rumstemperatur innan höljet öppnas för att undvika kondens på membranet). Märk plattan med patientidentifikation.
- 2** Sug upp urin med hjälp av pipetten. Droppa **3** droppar i provbrunnen på plattan. För varje prov använd en separat pipett och testplatta.
- 3** Vänta på att rödfärgade band skall framträda. Beroende på koncentrationen av hCG, kan ett positivt resultat observeras redan efter c:a 40 sek. Avläs efter **3** minuter. **OBS! Tolka ej något resultat efter 10 minuter.**

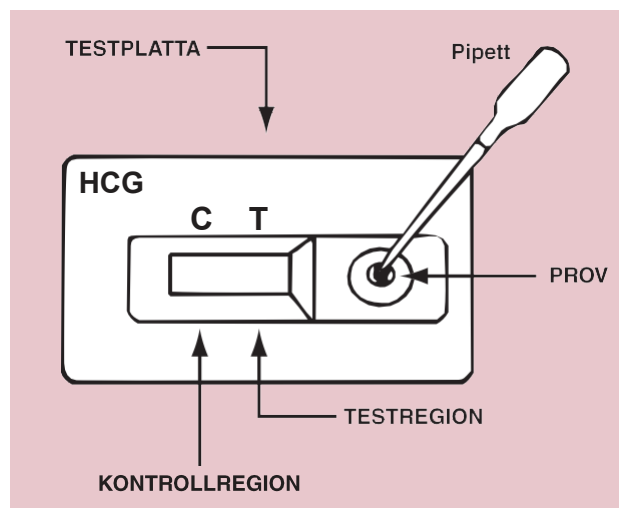

AVLÄSNING AV TEST

POSITIVT:


*Två distinkt **rosafärgade** band syns. Det ena i patienttestregionen (T) och det andra i kontrollregionen (C). Även **svagt rosa** band vid (T) räknas som positivt.*

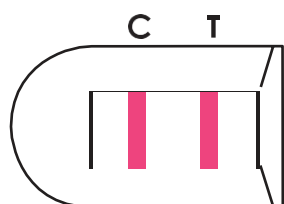

POSITIV

NEGATIVT:


Endast ett rosa band framträder och det i kontrollregionen (C). Inget band syns i patientregionen (T).

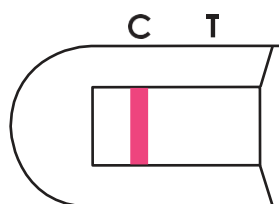

NEGATIV

OGILTIGT:

Inget synligt band i någon region indikerar att något gått fel vid proceduren eller att desorientering av testreagenserna har inträffat.

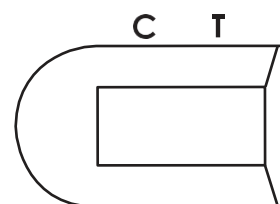

OGILTIG