


## VÄTSKA (K-1206)

1


### PROV (1:1)



Tillsätt vertikalt **7 droppar** buffert i ett rör (eller pipettera **200 µl** med en pipett).

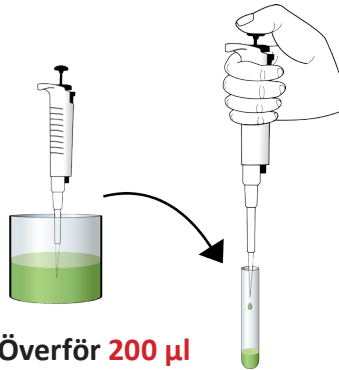

Överför **200 µl** patientprov till röret.

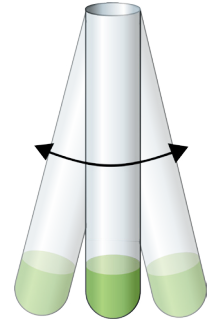

Rör om och homogenisera lösningen.

2

### PROVKVANTITET



Tillsätt **100 µl** av det spädda provet i kassetts provbrunn.

3

### AVLÄSNING

- Avläs resultatet efter **15 minuter**
- Avläs alltid resultatet på en våt testremsa.
- Uppkomsten av nya linjer får inte beaktas efter att reaktionstiden har passerats.
- Alla testlinjer, även svaga, bör betraktas som positivt resultat.




#### Positiv




#### Svag positiv



#### Negativ

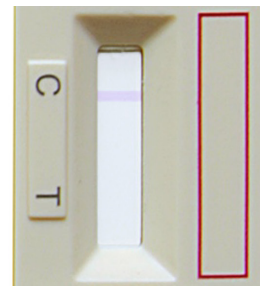

#### Ogiltig

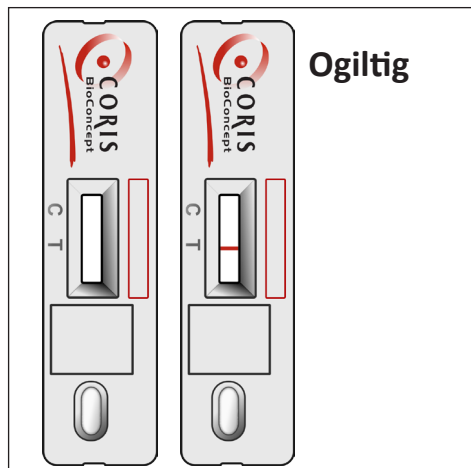


## TORR PINNE (K-1506)

1


### PROV



Tillsätt vertikalt **18 droppar** (eller **500 µl**) buffert i ett rör.

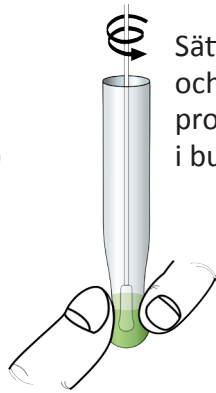

Sätt ner och snurra provpinnen i bufferten.

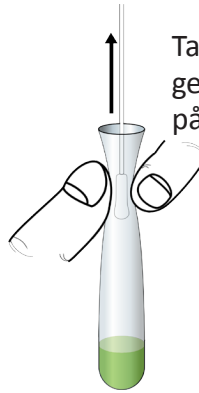

Ta bort pinnen genom att trycka på rörets sidor för att pressa ut vätskan.



Sätt fast droppkorken ordentligt. Rör om och homogenisera lösningen.

2

### PROVKVANTITET



Tillsätt vertikalt **3 droppar** av det spädda provet i kassetts provbrunn.



3

### AVLÄSNING

- Avläs resultatet efter **15 minuter**
- Avläs alltid resultatet på en våt testremsa.
- Uppkomsten av nya linjer får inte beaktas efter att reaktionstiden har passerats.
- Alla testlinjer, även svaga, bör betraktas som positivt resultat.



#### Positiv



#### Svag positiv



#### Negativ



#### Ogiltig

