

# Kortfattad beskrivning av drogtest

Denna beskrivning visar hur du enkelt, snabbt och säkert använder olika abc drogtest.

## TESTUTFÖRANDE

**1**

Ett, två, tre!

Ta av plastskyddet på testkassetten och doppa multistickan lodrätt i urinprovet. Doppa endast stickorna (inte kassetten).

**2**

Håll stickorna kvar i ca 30 sekunder i urinprovet.

30 s

**OBS!** Urinnivån får ej överstiga testets pilmarkeringar.

**3**

1. Avläsning av pH, kreatinin, S.G.:  
**efter 1 minut. Se färgkartan.**

2. Avläsning av droger:  
**efter 5 minuter.**

**OBS!** Tolka inte resultatet senare än 10 minuter!

1 min  
pH, krea, S.G.

5 min  
Drogtest

### Multi/Combo Drogtest

**Drogteststicka**

**Testfönster Kontrollinje (C) (SYNS ALLTID)**

**Testlinje (T)**

**Testfönster pH, kreatinin, S.G. 1-min/resultat**

**Strekkod**

**Uppsugningsdel**  
Doppas i urinen

**Plastskydd**

Salofa oy  
Negative Positive Invalid  
C C C  
T T T  
ID OP DATE  
pH pH pH Creatinine  
pH pH pH  
THC THC  
THC THC  
5 min 1 min  
Urine Sample Should Not Touch The Plastic Device

## AVLÄSNING AV RESULTAT

Analyter som skall läsas av (t ex pH, krea, S.G.) kan variera beroende på testet.

- 1** 1 minut – pH, kreatinin, S.G.
- 2** 5 minuter – avläs drogtesterna

Testresultat			
pH, kreatinin, S.G.			
pH	krea (CR) mg/dl	S.G.	
2	0	1.000	Onormalt lågt värde
3	10		
4	20	1.005	Normalt värde
7	100	1.015	
9		1.025	
10			Onormalt högt värde
11	>1.030		
12			

Tolka resultatet efter 1 minut.

**POSITIV**  
Ett streck i kontrollinjen (C).  
Inget streck vid testlinjen (T).

**NEGATIV**  
Två streck i både kontrollinjen (C) och testlinjen (T).

**OGILTIG**  
Inga streck eller enbart streck i testlinjen (T).  
Om inga streck syns i kontrollinjen (C) är testet ogiltigt.

Linjerna kan ha olika intensitet. Även en svag färgning av testlinjerna indikerar ett negativt resultat. Ett positivt resultat bör alltid verifieras av ett ackrediterat laboratorium.